



POLITIQUE EN VIGUEUR CHEZ TEMPUR CANADA

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU MATELAS TEMPUR-PEDIC^{MD}

SENSIBILITÉ À LA TEMPÉRATURE

Le Matelas Suédois^{MC} Tempur-Pedic^{MD} est sensible à la température. Même une légère variation de température (un degré) peut modifier ses caractéristiques. À une température de moins de 15,6°C (60°F), le matelas Tempur-Pedic se raffermi mais, à la température du corps, il devient très malléable et s'adapte à votre anatomie. Si votre matelas Tempur-Pedic est livré pendant l'hiver, il est important de le laisser réchauffer à la température de la pièce avant de le déplacer. Pour obtenir des résultats optimaux, maintenez les produits Tempur-Pedic à la température de la pièce. L'exposition prolongée ou répétée à des conditions de chaleur ou de froid extrême peut réduire les propriétés d'allègement de la pression. N'exposez pas les produits Tempur-Pedic à la lumière directe du soleil.

COUVERTURES ÉLECTRIQUES ET COUSSINS CHAUFFANTS

En raison de la sensibilité à la température du matériau TEMPUR^{MD}, il est important de ne jamais utiliser de couvertures électriques ni de coussins chauffants avec le matelas Tempur-Pedic. Tout contact avec ce type d'article peut altérer les propriétés uniques du matériau TEMPUR.

SOMMIER

Un sommier semi-rigide neuf, une plate-forme ou une autre surface solide au niveau doit être placée sous le Matelas Suédois Tempur-Pedic. D'autres types de sommiers à ressorts ou de surfaces non rigides causeront un affaissement du matelas, réduisant par le fait même les propriétés d'allègement de la pression du matériau TEMPUR.

HOUSSE EN VELOURS DE COTON AMOVIBLE

La housse antimicrobienne recouvrant les matelas suivants comporte quatre fermetures éclair latérales, ce qui vous permet de la retirer facilement pour la laver :

Le lit Original *signé* Tempur-Pedic^{MC}
Le lit Classique *signé* Tempur-Pedic^{MC}

L'usage d'une laveuse et d'une sécheuse de taille industrielle est fortement recommandé car la plupart des appareils domestiques ne sont pas assez grands pour y loger la housse de façon adéquate. Veuillez suivre la procédure suivante pour laver la housse :

1. Détachez la partie supérieure de la housse et laissez la partie inférieure antidérapante en place sous le matelas.
2. Lavez seulement la partie supérieure de la housse. **Le matériau TEMPUR ne devrait jamais être lavé.**
3. Réglez la laveuse au cycle délicat.
4. Utilisez de l'eau tiède seulement.
5. Utilisez un détergent doux ou délicat.
6. Séchez la housse à la machine, à température basse, ou laissez-la sécher à l'air libre.
7. À la fin du séchage à la machine, le cas échéant, retirez la housse de la sécheuse et laissez-la sécher à l'air libre.
8. **N'UTILISEZ AUCUN TYPE DE PRODUITS À BASE DE CHLORE OU DE DÉTACHANTS FORTS.**

1807 Wonderland Road North, London ON N6G 5C2
Sans frais : 1-800-887-4321 Téléc. : 519-679-4793



POLITIQUE EN VIGUEUR CHEZ TEMPUR CANADA

PROTÈGE-MATELAS APPROUVÉS PAR TEMPUR Canada :

(i) COUVRE-MATELAS PROTEX-IT^{MC}

Pour tirer les meilleurs avantages des propriétés d'allègement de la pression du matériau TEMPUR^{MD}, utilisez seulement le couvre-matelas imperméable ultramince Protex-It approuvé par TEMPUR Canada ou des draps standard, ou les deux. Le couvre-matelas Protex-It est lavable à la machine à une température maximale de 95°C. NE PAS UTILISER D'AGENT DE BLANCHIMENT. Séchez le couvre-oreiller à la machine à température basse ou laissez-le sécher à l'air libre. Ce couvre-matelas ne convient pas aux personnes souffrant d'incontinence.

HOUSSE IMPERMÉABLE DE PREMIÈRE QUALITÉ TEMPUR-Medical^{MD}

La housse imperméable Tempur-Medical peut être nettoyée au chiffon à l'aide d'un désinfectant pour centre hospitalier standard (germicide, tuberculocide et fongicide) conformément aux directives de nettoyage avec un désinfectant. La housse imperméable Tempur-Medical peut également être nettoyée avec un savon doux et de l'eau. Les produits à base d'alcool peuvent également être utilisés, sans risquer de dessécher ou de craqueler la housse. Cette housse ne convient pas aux personnes souffrant d'incontinence.

S'HABITUER À UN NOUVEAU MATELAS TEMPUR-PEDIC

Comme pour tout autre matelas, il faut un certain temps pour s'habituer à la sensation unique que procure votre nouveau matelas Tempur-Pedic.

CIRCULATION AMÉLIORÉE

L'un des avantages de l'allègement de la pression est l'amélioration de la circulation. Certaines personnes peuvent éprouver une sensation de chaleur en raison de l'amélioration de leur circulation. Si vous éprouvez une telle sensation, nous vous suggérons d'utiliser une couverture de moins la nuit. De plus, l'utilisation d'un moins grand nombre de couvertures permet un sommeil plus détendu.

SENTEUR TEMPORAIRE

Tous les matériaux de polyuréthane dégagent une certaine senteur lorsqu'ils sont neufs. Cela est normal et entièrement inoffensif.

SUBSTANCES CHIMIQUES

Les produits Tempur-Pedic ne contiennent pas d'éther diphenylique polybromé ni d'autres produits chimiques risquant de nuire à la santé. Nos produits satisfont les exigences relatives à la sécurité contre les incendies sans avoir recours à des produits chimiques contenant de l'éther diphenylique polybromé.

NUL BESOIN DE TOURNER LE MATELAS

Contrairement aux matelas à ressorts traditionnels, le matelas Tempur-Pedic n'a jamais besoin d'être tourné ou changé de côté. Si vous le désirez, vous pouvez toutefois faire pivoter le matelas à l'horizontale pour en inverser la tête et le pied. Le matelas Tempur-Pedic est composé d'une couche inférieure en polyuréthane haute densité et d'une couche supérieure faite de matériau TEMPUR.